


# ANSLUTNING BLODPÅSE FÖR TRANSFUSION

## Komma åt portarna på blodpåsen

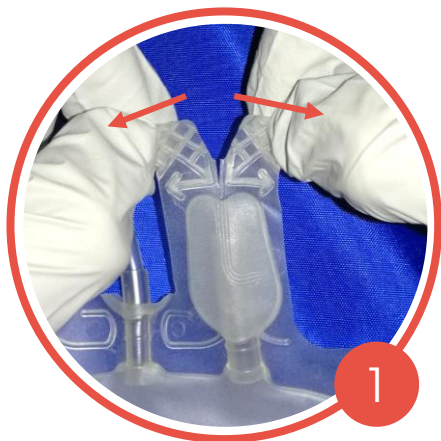

Öppna portskyddet enligt bilden med båda händerna.



Dra toppen av portskyddet nedåt mot påsen.




Håll nere portskyddet med en hand för att frigöra toppen på porten. Detta stabiliserar porten vid anslutning med spike.

## Ansluta spike till blodpåsen



Fatta basen på spiken och tryck in den ordentligt i porten, ända tills den når septumet.

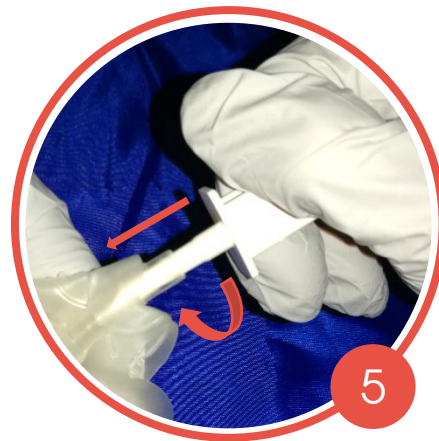

Fortsätt att ansluta spiken genom att vrida den i en cirkulär rörelse tills spetsen har genomborrat septumet.

**Undvik att trycka spiken för djupt!**