


## SIIRTOPORTIN AVAAMINEN JA VERENSIIRTO- LETKUSTON YHDISTÄMINEN

### Siirtoportin

suojan avaaminen

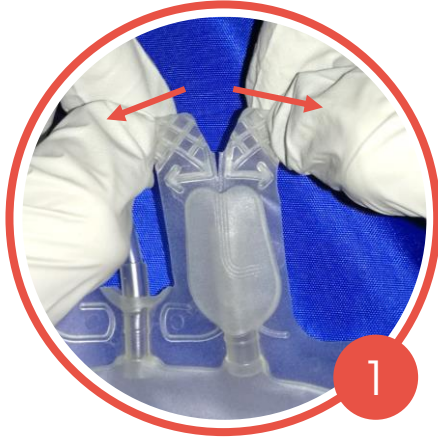

Repäise siirtoportin suoja auki käyttäen molempia käsiä kuvassa esitettyyn tapaan.



Taita suojat pois päin siirtoportin kärjestä veripussia kohti.



Pidä taitetuista portinsuojista kiinni toisella kädellä paljastaaksesi siirtoportin. Tämä helpottaa siirtoportin pitämistä vakaasti paikallaan, kun yhdistät verensiirtoletkuston siihen.

### Verensiirtoletkuston yhdistäminen veripussiin



Ota dominoivalla kädelläsi kiinni verensiirtoletkuston piikin alapuolelta. Yhdistä letkusto verivalmisteseeseen siirtoportin sisällä olevaan väliseinään saakka.



Jatka yhdistämistä kiertävällä liikkeellä, kunnes piikki on lävistänyt väliseinän.

**Älä työnnä piikkiä liian syväälle!**